

Sécu O2 à la Croisette



Une nouvelle bouteille O2
Est disponible dan l'armoire sécu
Pour le public.
Elle est munie d'un masque à la
demande et
D'une masque en débit continu.

A gauche le masque à la demande
pour une personne consciente qui
respire.
A droite le masque a débit continu
pour une personne inconsciente.
Les deux peuvent fonctionner en
simultané.






Le volant noir sert à ouvrir la bouteille.
Ouvrir = sens inverse aiguille montre
Fermé sens aiguille montre.

Le volant vert sert au débit continu. 0 = fermé...12 ou 30 L / minute pour personne inconsciente.



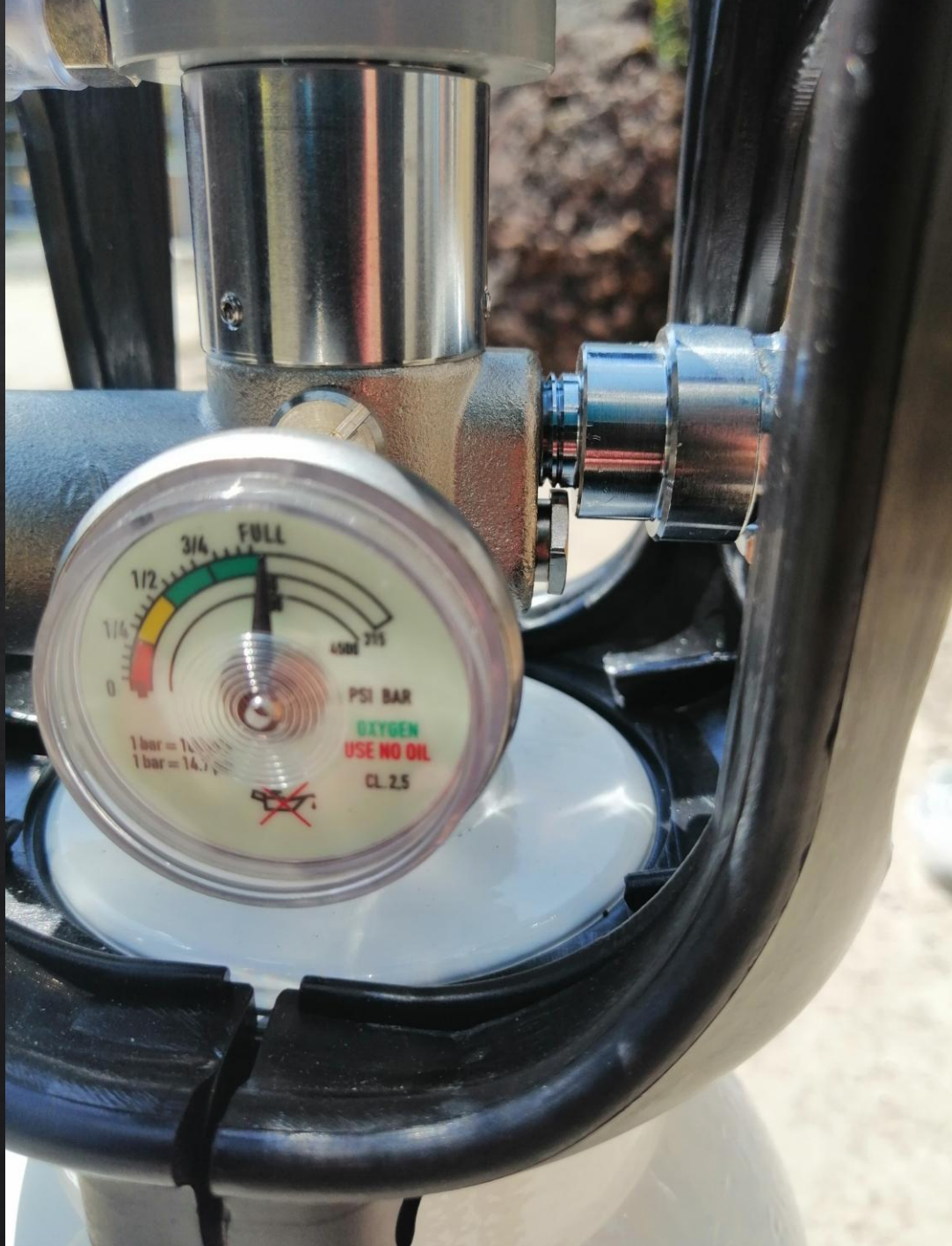

A l'ouverture du volant noir, vérifier au verso la pression de la bouteille sur le mano !



Pour une personne consciente qui respire, donnez le masque à la demande . C'est le cas pour les suspicion d'ADD ..essoufflement, stress....

Le masque dispose d'une sangle pour fixer le masque derrière le crâne et assurer ainsi une meilleure diffusion de l'O₂. Vous les voyez ici non saignée (en noire).



Si la victime est inconsciente alors utilisez le masque « non rebreather » qui débite en continu.

Si vous faite le RCP, la personne qui insuffle la victime peut respirer sur le masque à la demande et fournir ainsi un air avec 96% d'O₂ (au lieu de 16%)....

Le masque « non rebreather » se fixe sur l'embout en face du masque à la demande (180°).

On peut aussi y fixer le Bavu qui se trouve dans l'armoire.

Dans l'armoire se trouve aussi l'ancienne bouteille O₂ avec le masque à débit constant... (tube orange)

En évacuant la victime vers les vestiaires, Il y a encore une bouteille de 20L d'O₂ avec masque à la demande.

